

Atspaudų medžiaga:	Apdirbimas:	Laikas iki modelio atpylimo		Kontrolinis modelis:	Gipsai:
	Dezinfekcija Įtampos nuėmimas Sausinimas!!!	Dezinfekcija Įtampos nuėmimas Sausinimas!!!	Ankščiausiai atpilti po	Laikymo laikas	<b>Pastaba:</b> pasikeitimai atspauode matomi jau po pirmo atpylimo!
Alginatas:	<b>Dezinfekcija: taip</b> Mirkyti: pagal gamintoją purkšti min. 1 Min. <b>Įtampos nuėmimas: ne</b> palikti ploną vandens sluoksnį <b>Sausinimas: ne</b>	Kaip įmanoma greičiau	Laikymas negalimas!	Negalimas atpylimas dėl atspaudos deformavimosi	<b>III klasė:</b> <b>pico-crema soft</b> SHERAALPIN pico-crema soft-speed <b>Artikuliacinis gipsas</b> arti-speed SHERAMOUNT
	<b>Dezinfekcija: taip</b> Mirkyti: pagal gamintoją Nepurkšti <b>Įtampos nuėmimas: ne</b> pakanka plonos vandens plėvelės <b>Sausinimas: ne</b>	<b>Atpilti po 1-2 val.</b>	Galima laikyti iki 7 parų. Nusausinti ir laikyti saugiai nuo šviesos ne aukščiau kaip 25 laipsn. temp.	Modelį atpilti įmanoma, bet būtina palaukti 1 val. po pirmo modelio atpylimo	<b>IV klasė</b> <b>Gipsas antagonistams, atspaudas iš alginato</b> <b>hydro-plaster</b> <b>pico-stone M</b> <b>Gipsas dantų lankui</b> <b>quadro-rock plus</b> <b>Implantat-rock</b> <b>camtec-rock</b> <b>Cokoliniai gipsai</b> <b>suppen-sockler</b> SHERASOCKEL-FLUSSIG <b>Didelio tikslumo gipsai</b> <b>Z 260 v</b> <b>SHERAPURE</b> <b>SHERAMAXIMUM 2000</b>
A - silikonas:	<b>Dezinfekcija: taip</b> <b>Įtampos nuėmimas: taip</b> su easyflow nenaudoti alkoholio turinčių medžiagų <b>Sausinimas: taip</b> atsargiai naudojantis suspaustu oru	<b>Apilti po 2-3 val.</b>	Galima laikyti iki 6 mėn. stabilioje kambario temperatūroje	Modelį atpilti įmanoma, bet būtina palaukti 1 val. po pirmo modelio atpylimo.  Vengti per stipraus suspaudimo.	<b>V klasė</b> <b>Didelio išsiplėtimo gipsas</b> <b>prothetic stone</b>
	<b>Dezinfekcija: taip</b> <b>Įtampos nuėmimas: taip</b> su easyflow nenaudoti alkoholio turinčių medžiagų <b>Sausinimas: taip</b> atsargiai naudojantis suspaustu oru	<b>Atpilti po 3 val. !</b>	Laikyti iki 7 val. (Maksimaliai 24 val. dėl galimo atspaudos susitraukimo)	Modelį atpilti įmanoma, bet būtina palaukti 1 val. po pirmo modelio atpylimo. Vengti per stipraus suspaudimo. Labai blogas sugrįžimas į pradines dimensijas po suspaudimo.	<b>PASTABA:</b> žalia spalva žymimi gipsai, esantys sandėlyje.

**Dėmesio!** Po dezinfekcijos ir prieš įtampos nuėmimą pabarstyti gipso miteliais ir palikti iki 2 min. veikimui.